

Appareil de PhotoBioModulation portatif sur pied à roulettes

Pied à roulette de type médical

- Pied Carina lesté 5 branches.
- 5 roulettes caoutchouc pleines dont 3 avec freins.
- Tube télescopique avec 2 paniers pour accessoires.
- Hauteur ajustable de 60 à 100cm (Hauteur du support flexibles).
- 2 flexibles de 60cm avec rotules magnétiques Loupi.

Cartes électroniques LED

- Dimensions : 205x205x16mm.
- 25 LED rouges 660nm, Durée de vie >50000H.
- Anneau aimant pour rotule magnétique 360°.
- Alimentation 24V, Vmax 25V, Pmax 25W (par carte).
- Bouton ON/OFF et réglage minuterie de 5 à 20 minutes.
- Affichage LED à 2 chiffres du temps restant.

Fonctionnement

A la mise sous tension secteur l'appareil s'allume et s'éteint puis se met en attente, afficheur allumé à 00. Une pression sur le bouton poussoir de commande on/off programme 5 minutes de fonctionnement continu, chaque pression supplémentaire incrémente de 5 minutes jusqu'à 20 minutes max, l'appareil s'allume lorsque le poussoir est relâché. L'afficheur décompte le temps restant jusqu'à extinction et se remet en attente. Une pression sur le poussoir durant l'allumage provoquera l'extinction immédiate des LED.

Recommandations d'utilisations du Carré Rouge

Porter des lunettes protectrices filtrantes
Distance minimale avec le sujet conseillée : 3 cm
Temps d'exposition maximum à la lumière rouge par séance : 20 min
Ne pas forcer le flexible au pliage à moins de 15 cm d'écart entre les côtés
Ne pas étendre ce flexible à plus de 45cm d'écart entre la rotule et la base
Usage intérieur uniquement

Alimentation secteur

- De table, type Médical Adaptor MW.
- Input/Entrée 100/240 VAC, 50/60 Hz 1,4/0,7A.
- Output/Sortie : 24V/2,5A, 60W max.
- Cable secteur 5M avec interrupteur.
- Placement sécurisé dans le panier inférieur.

Généralités

Cet appareil a été conçu et développé par LOUPI LED Science, marque de LOUPI SAS fondée en 1976. Simple Tech, éco conçu, réparable, démontable, recyclable et fabriqué en France dans des usines certifiées ISO 13485 et/ou ISO 9001. Garantie 2 ans. S.A.V. par Electronique du Mazet tel. 04 71 65 02 16
Certificats de conformité CE sur demande : contact@loupiledscience.fr tel. 01 49 15 99 99
Usage intérieur uniquement



**CARRE
ROUGE**

Affichage
minuterie

Bouton ON/OFF

Rotule
magnétique
360°

Verso carte

Flexibles

Leds
rouges

Panier pour
lunettes de
protection

Panier
alimentation

Recto carte

Tube ajustable
en hauteur

Câble secteur
5 mètres

Pied lesté

5 roulettes dont 3
avec frein à pied

LOUPI
LED Science