

Notice d'emballage

Carré Rouge

Contenu du colis :

- L'appareil carré rouge complet, pied à roulettes, tube paniers, cartes LED, avec bloc d'alimentation secteur, câbles secteur et basse tension.
 - Une prise interrupteur.
- Deux sur lunettes de protection VISILUX et une lunette masque opaque.
- Une clé pour le serrage du tube sur le pied à roulette.
 - Documentation produit, notice d'emballage.





Déballage :


- Enlever le calage
- Sortir l'ensemble tube / paniers-flexibles-carrés rouges
 - Sortir le pied à roulettes
 - Enlever le calage
 - Sortir les accessoires




IMPORTANT : Les calages en polyéthylène et le carton sont faits en matériaux 100% recyclables et doivent être déposés dans les bacs à déchets correspondants



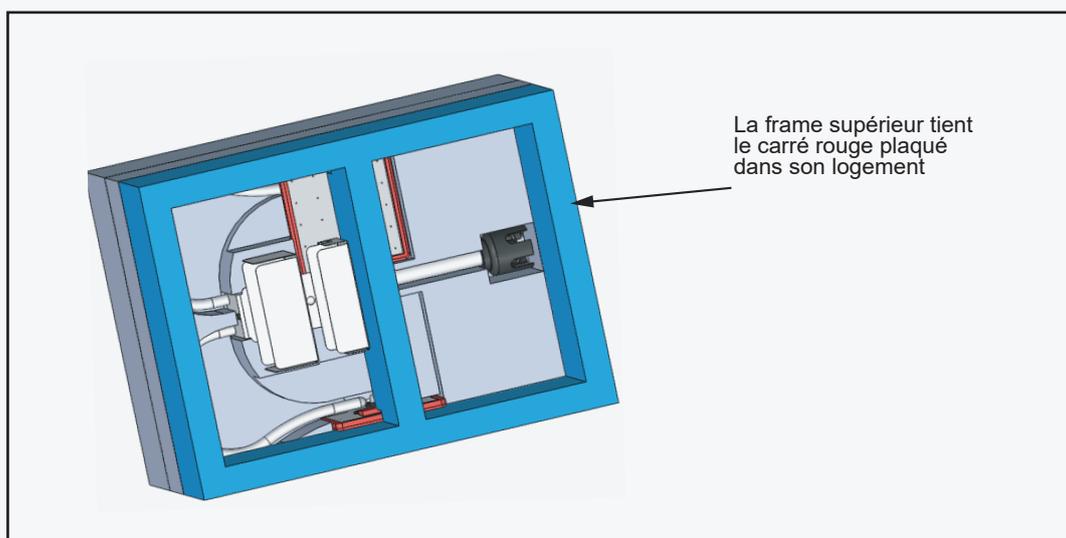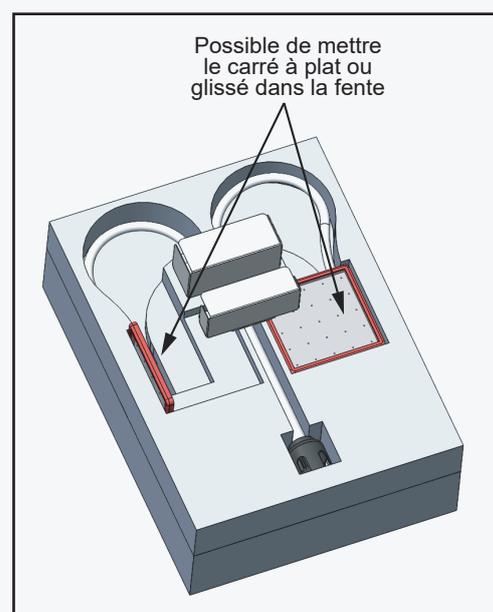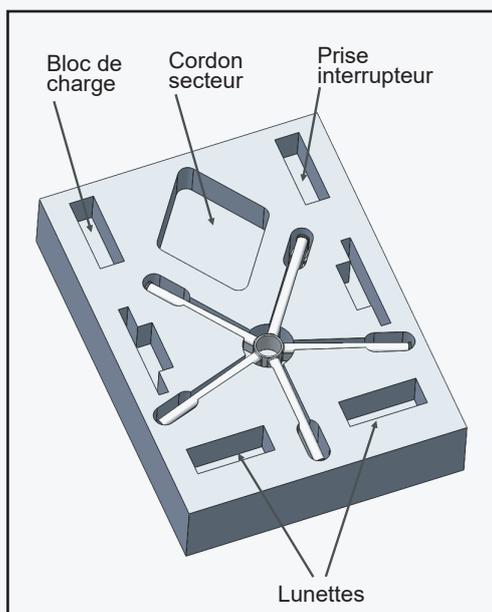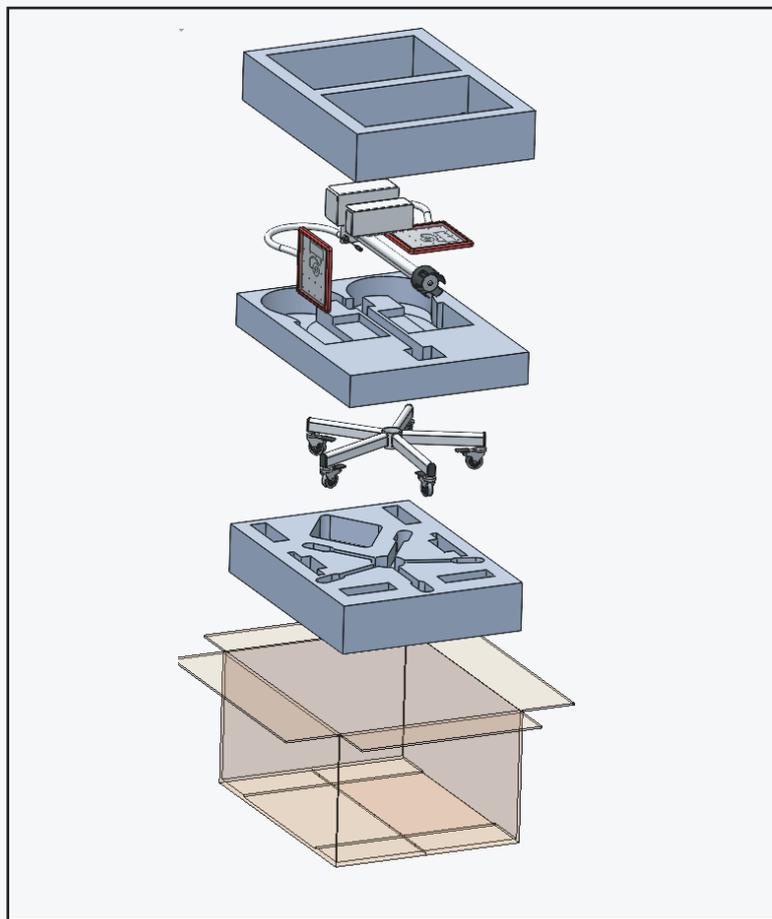


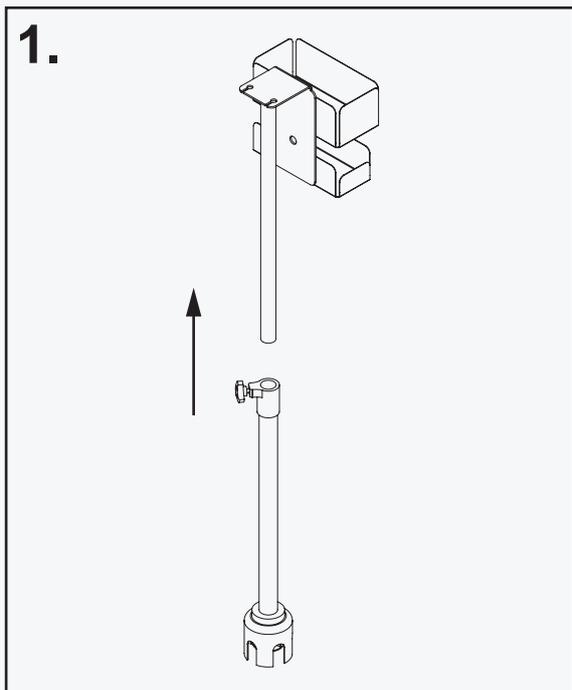


→ Séparer le *tube de base* du *tube panier*

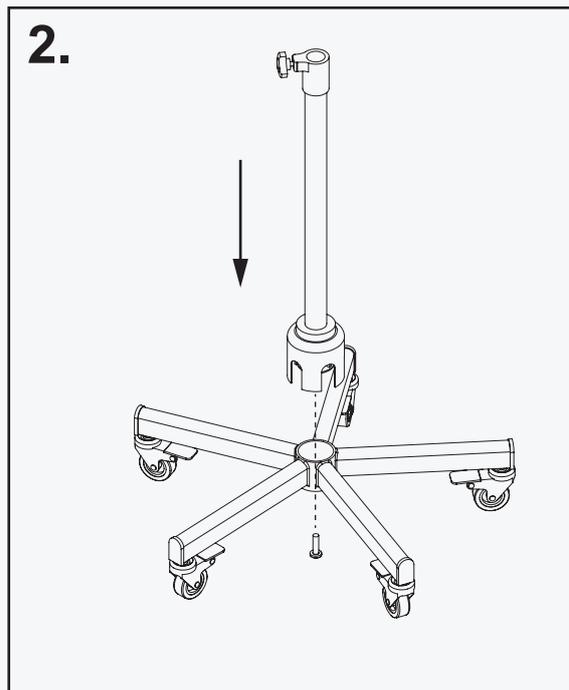


→ Visser le *tube de base* sur le *ped à roulette* grâce à la vis

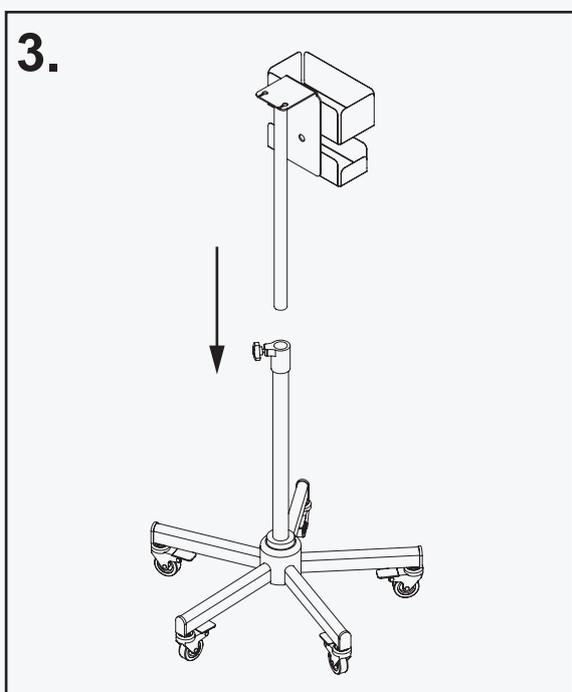


→ Enfiler le *tube panier* dans le *tube de base*

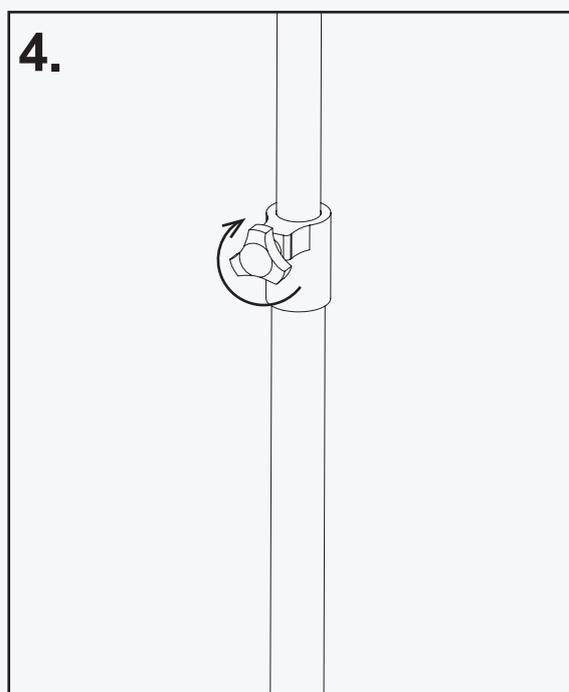


→ Bloquer grâce au bouton de serrage

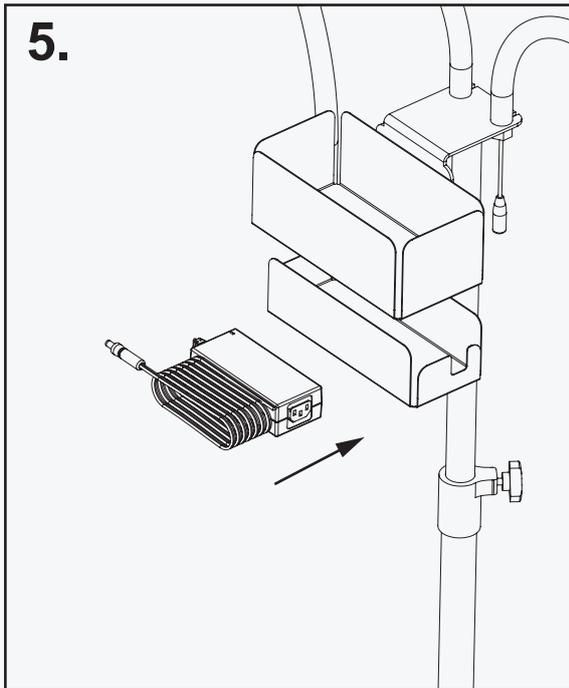


→ Positionner le bloc d'alimentation secteur dans le panier inférieur selon la photo de la fiche technique, l'encoche du panier placée en regard de la prise du câble secteur. Ranger le câble basse tension à côté du bloc d'alimentation.

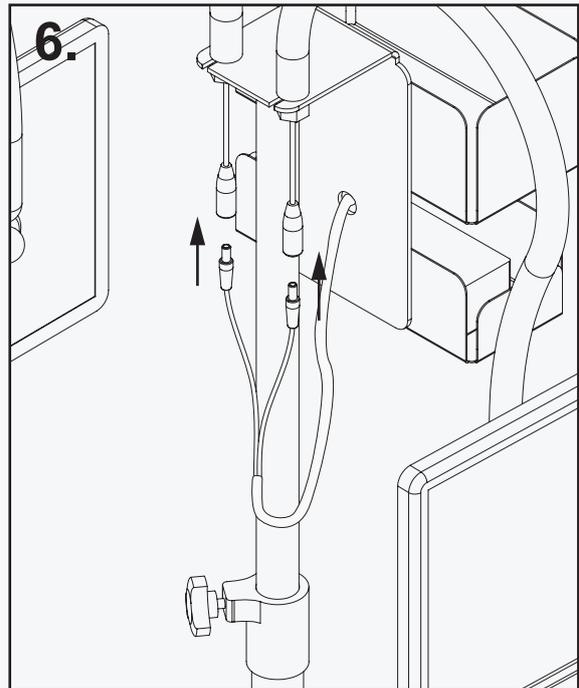

→ Connecter le doubleur de prise sur les câbles sortants des flexibles

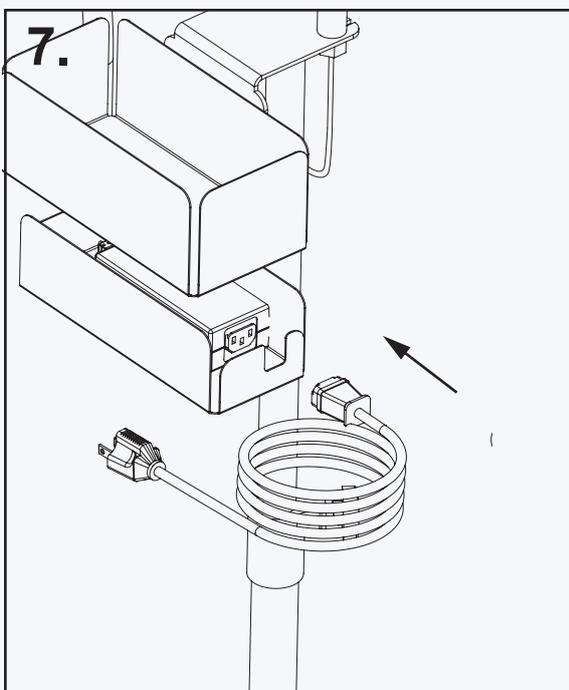

→ Connecter le doubleur de prise au câble basse tension au travers du trou de passage et connecter le câble secteur au bloc d'alimentation

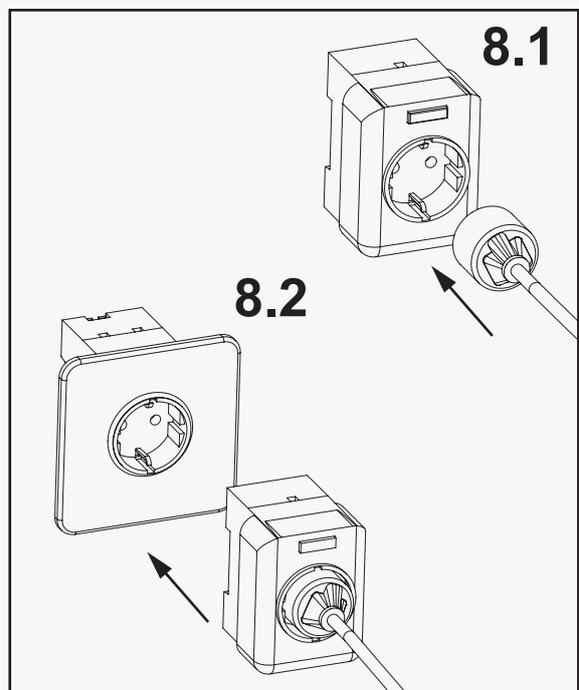

→ Connecter le câble secteur sur la prise avec interrupteur et connecter la prise interrupteur dans une prise secteur murale

→ Votre appareil est prêt à fonctionner.
Voir le texte « fonctionnement » de la fiche technique